

# Protección de la piel debajo de mascarillas y gafas protectoras (EPIs)



El reciente brote de COVID-19 está ejerciendo una gran presión sobre el personal sanitario en todo el mundo.

Para protegerse de las infecciones, los profesionales de la salud están tomando **precauciones adicionales**, usando máscaras y gafas protectoras para tratar a los pacientes. Estos equipos, aunque son una medida de seguridad importante, **pueden provocar lesiones por presión y molestias con el uso prolongado**<sup>1,2</sup>.

La investigación ha demostrado que los hidrocoloides pueden usarse para proteger la piel en riesgo y prevenir este tipo de lesiones<sup>3,4</sup>.

Coloplast pone a disposición esta guía para ayudar a los sanitarios a cortar y colocar los apósitos para este fin.

## Recomendaciones de corte para uso de apósitos en zonas de roce o fricción:

### Cómo colocar los apósitos indicados para protección frente a EPIs


Asegúrese de que la piel está completamente seca antes de aplicar el producto



Áreas donde puede experimentar fricción en la piel: mejillas, nariz y/o frente.



Corte para adaptar a las áreas donde la piel está en riesgo. Recuerde cortar antes de quitar las lengüetas protectoras.

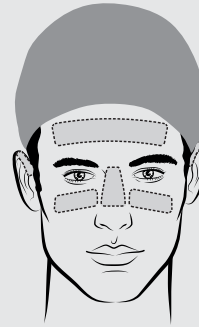

Considere la técnica aséptica durante el manejo y aplicación, con el lado adhesivo del producto en contacto con la piel. Pase suavemente los dedos por el producto una vez aplicado para ayudarlo a adherirse a la piel.



Póngase la mascarilla protectora y las gafas.

