



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

GUÍA

DE RECURSOS MATERIALES, PARA LA PREVENCIÓN Y CUIDADO DE HERIDAS CRÓNICAS

Plataforma Logística Sanitaria de Granada

Reconocido de interés por



Febrero 2020

GUÍA DE RECURSOS MATERIALES, PARA LA PREVENCIÓN Y CUIDADO DE HERIDAS CRÓNICAS. Plataforma Logística Sanitaria de Granada.



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

GUÍA DE RECURSOS MATERIALES, PARA LA PREVENCIÓN Y CUIDADO DE HERIDAS CRÓNICAS

Editores: Godel Impresiones Digitales, S.L.
Dep. Legal: Gf- 1118/2020
ISBN: 978-84-17970-97-0

Reservados todos los derechos a los autores. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en la leyes, la reproducción total o parcial de esta obra.

Área de Gestión Sanitaria Nordeste. (AGSNE)

Área de Gestión Sanitaria Sur. (AGSS)

Distrito Sanitario Granada-Metropolitano. (DSGM)

Hospital Universitario Clínico San Cecilio. (HUSC)

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. (HUVN)


Reconocido de interés por



Proyecto de Implantación de Guías de Buenas Prácticas en Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados.



AUTORES POR ORDEN ALFABÉTICO:

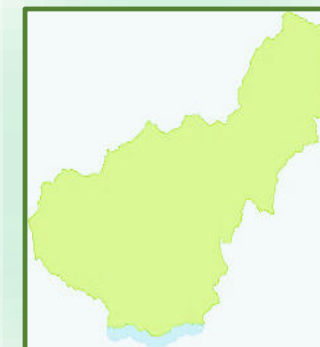

AGUILERA CAMPAÑA, M^a CARMEN

Supervisora Cuidados Paliativos/Pluripatológicos. (HUVN)

CASSINI GÓMEZ DE CÁDIZ, VÍCTOR ALFREDO

Enfermero referente en heridas crónicas. (HUSC)

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, ROSARIO

Enfermera referente en heridas crónicas. (HUVN)

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, FRANCISCO

Enfermero de Práctica Avanzada de Heridas Crónicas. (DSGM)

GUTIÉRREZ LINARES, SOLEDAD

Jefa de Bloque de Calidad y Gestión de Cuidados.(HUSC)

JIMÉNEZ MEGÍAS, MÓNICA

Supervisora de Recursos Materiales. (HUVN)

LOZANO SÁNCHEZ, ANTONIA

Supervisora de Medicina Interna, Hospital de Baza.(AGSNE)

MARTÍNEZ VARÓN, MIGUEL JAVIER

Enfermero referente en heridas, U.G.C. Caniles. (AGSNE)

PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO JUAN

Supervisor de Cirugía General del Hospital Sta. Ana, Motril. (AGSS)

QUIÑÓZ GALLARDO, MARÍA DOLORES

Supervisora Gestión de Cuidados. (HUVN)

SÁNCHEZ PALOMINO, JOSÉ MARÍA

Coordinador de Cuidados de UGC Motril S. Antonio.(AGSS)

VILLANUEVA CAMACHO, JESÚS

Enfermero referente en heridas, U.G.C. La Caleta. (DSGM)

* Los autores firmantes, declaran que no existe ningún conflicto de intereses al redactar esta Guía.

* Validación externa: Grupo Enfermera de Práctica Avanzada en el Cuidado de Personas con Heridas Crónicas Complejas.

GUÍA BASADA EN PARTE:
ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURAS (APÓSITOS), PARA
LOS CENTROS VINCULADOS A LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE GRANADA (AMSU001-2019/28698)

GUÍA DE RECURSOS MATERIALES, PARA LA PREVENCIÓN Y CUIDADO DE HERIDAS CRÓNICAS. Plataforma Logística Sanitaria de Granada.

Presentación

La elaboración de este documento parte de la Comisión de valoración de materiales de curas de Granada, para dar respuesta al gran número de productos disponibles.

Nos es grato presentar esta herramienta cuyo objetivo final es que sirva a los profesionales de instrumento de trabajo para el mejor y más eficiente abordaje de las heridas, para que sea utilizada en la prestación de cuidados de una forma segura, disminuyendo la variabilidad clínica, garantizando la continuidad de cuidados interniveles en la prevención, el tratamiento de lesiones relacionadas con la dependencia y las heridas.

Justificación

La cura de heridas ha experimentado en los últimos tiempos un gran avance y nuevas incorporaciones de productos por parte de la industria. En muchas ocasiones estos productos no son fáciles de identificar por grupos terapéuticos y no disponen de fichas que recojan sus características, indicaciones, contraindicaciones o precauciones, por lo que los profesionales se encuentran con información poco específica y unificada.

Es habitual que en los centros no se disponga de protocolos comunes de actuación, que existan deficiencias de comunicación entre niveles asistenciales y profesionales de Atención Primaria y de Atención Hospitalaria, habiendo mayor variabilidad de la prescripción y utilización de estos productos sanitarios.

Objetivo

El objetivo de esta guía es disponer de un material documental sobre productos para la prevención y tratamiento de lesiones relacionadas con la dependencia y las heridas, que permita orientar a los profesionales en la selección y optimización de su utilización.

Agradecimientos

Agradecer a las Direcciones Gerencias, Direcciones de Enfermería de los Hospitales Universitarios Clínico San Cecilio, Virgen de las Nieves, Área Sanitaria Sur de Granada, Área Sanitaria Nordeste de Granada, Distrito Granada-Metropolitano y a los responsables de la Plataforma Logística Sanitaria de Granada, el apoyo para que este documento se materializase.

ÍNDICE DE LA GUÍA POR GRUPO TERAPÉUTICO	PÁGINAS
<u>ÁCIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS.</u>	7 y 8
<u>ALGINATOS.</u>	9 y 10
<u>ANTIMICROBIANOS.</u>	11 a 22
<u>APÓSITO IMPREGNADO.</u>	23
<u>DESBRIDANTES ENZIMÁTICOS.</u>	24
<u>ESPUMAS DE POLIURETANO.</u>	25 a 37
<u>HIDROCOLOIDES.</u>	38
<u>HIDROFIBRAS.</u>	39 y 40
<u>HIDROGELES.</u>	41
<u>PELÍCULA DE POLIURETANO.</u>	42
<u>POLIACRILATOS.</u>	43
<u>PRODUCTOS BARRERA.</u>	44 y 45
<u>PRODUCTOS BIOACTIVOS.</u>	46 a 48
<u>SILICONAS.</u>	49 y 50
<u>DOCUMENTOS DE CONSULTA.</u>	51
<u>OTROS RECURSOS.</u>	52



ÍNDICE DE LA GUÍA POR DENOMINACIÓN COMERCIAL	PÁGINA	ÍNDICE DE LA GUÍA POR DENOMINACIÓN COMERCIAL	PÁGINA
ACTICOAT FLEX 10 X 20 CM	11	EXUFIBER 10X10 CM	40
ACTISORB PLUS 25 10,5 x 10,5 CM	12	FIXOMULL TRANSPARENT 10 CM	42
ALGISITE M 15x20 CM	9	FIXOMULL TRANSPARENT 5 CM	42
ALLEVYN ADHESIVE 17,5X17,5CM	25	HYPAFIX SKIN SENSITIVE. Ancho 5 CM	49
ALLEVYN ADHESIVE 22,5X22,5CM	25	INTRASITE CONFORMABLE 10X20CM	41
ALLEVYN GENTLE BORDER 15x15 CM	26	INTRASITE GEL 15GR	41
ALLEVYN HEEL	27	IODOSORB DRESSING 6x4 CM	17
ALLEVYN LIFE 15,4 x 15,4 CM	28	LINOVERA 50 ML	7
ALLEVYN LIFE 21x21CM	28	MEPILEX BORDER 10x10 CM	35
ALLEVYN SACRUM 17X17CM	29	MEPILEX BORDER 7,5x7,5 CM	35
ALLEVYN SACRUM 22,5 x 22,1	29	MEPILEX BORDER SACRUM 16x20 CM	36
AQUACEL AG+ 2x45 CM	13	MEPILEX BORDER SACRUM 22X25 CM	36
AQUACEL AG+ EXTRA 15x15	13	MEPILEX LITE 10x10 CM	37
AQUACEL CINTA 2X45 CM	39	MEPILEX PLATA 15x15 CM	18
AQUACEL EXTRA 15X15 CM	39	MEPITEL 18X 10 CM	50
AQUACEL FOAM ADHESIVO 12,5X12,5 CM	30	NOVAMED SKINCARE MILK 100 ML	8
ASKINA BARRIER FILM 28 ML	44	PRONTOSAN 350 ML	19
BIATAIN ALGINATE AG 10X 10 CM	14	PRONTOSAN GEL 30 ML	20
BIATAIN PLATA ADHESIVO	15	RYM CICATRIZANTE 25 GRS	47
BIATAIN SILICONE 12,5x12,5 CM	31	RYM COLAGENASA 30 GRS	24
BIATAIN SILICONE 17,5x17,5 CM	31	RYM QUEMADURAS 25 GRS	21
BIATAIN SILICONE TALON	32	URGOTUL FLEX 15x15 CM	23
BIATAIN SOFT-HOLD 15X15CM	33	URGOCLEAN 10x10 CM	43
CUTIMED ALGINATE 10 x 10 CM	10	URGOCLEAN AG 15X15 CM	22
CUTIMED EPIONA 10 x 10 CM	46	URGOCLEAN MECHA 5x40 CM	43
CUTIMED PROTECT CREMA 90 GRS	45	URGOSTART CONTACT 10x10 CM	48
CUTIMED SILTEC PLUS 10X10 CM	34	VARIHESIVE EXTRA FINO 15x15 CM	38
CUTIMED SORBACT 7X 9 CM	16	5	



SÍMBOLOS USADOS EN LA GUÍA

→ USO SEGÚN LA PROFUNDIDAD.



Superficial.



Profunda.



Superficial + Profunda.

→ USO SEGÚN NIVEL DE EXUDADO.



Nulo a Ligero.



Ligero a Moderado.




Moderado a Elevado.

→ USO SEGÚN TIPO DE TEJIDO




Tejido
Necrótico.

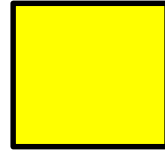


Esfacelos.



Infección.

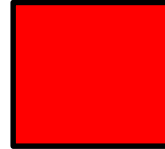

Granulación.

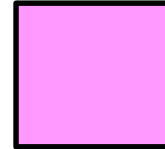

Epitelización.



Protección.

GC: GENÉRICO DE CENTRO.
RF: REFERENCIA.
PRECIO UNITARIO.

→ OTRAS RECOMENDACIONES



Hay que proteger piel
perilesional.



Precisa apósito
secundario.



Puede usarse bajo
terapia de compresión.



Se puede recortar.



No se puede recortar.



Qué
hacer



Qué NO
hacer



REGRESAR ÍNDICE
TERAPÉUTICO



REGRESAR ÍNDICE
DEN.COMERCIAL



CONSULTA
SÍMBOLOS

ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS



INDICACIONES

- Prevención y tratamiento de las úlceras por presión (UPP) de categoría I.
- Favorece la renovación de células epidérmicas mejorando la resistencia de la piel y facilitando la cicatrización. Mejora la microcirculación sanguínea y evita el daño causado por un aumento de los radicales libres, gracias a su actividad antioxidante. Restaura el film hidrolipídico evitando la deshidratación cutánea.



LÍQUIDO/PROTECTOR ACEITE.

LINOVERA 50 cc
GC: D54121
RF: 450081
PRECIO: 2,64 €



OBSERVACIONES

- Aplicar de 2 a 3 veces al día en las zonas de riesgo hasta su completa absorción y cicatrización.



- Se usa sólo sobre piel íntegra.
- No friccionar.



ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS



LÍQUIDO PROTECTOR/LECHE

NOVAMED MILK 100 ml
GC: D54039
RF: 172140
PRECIO: 3,86 €

INDICACIONES

- Prevención y tratamiento de la afectación cutánea en la insuficiencia venosa.
- Prevención y tratamiento de las úlceras por presión (UPP) de categoría I.
- Favorece la renovación de células epidérmicas mejorando la resistencia de la piel y facilitando la cicatrización. Mejora la microcirculación sanguínea y evita el daño causado por un aumento de los radicales libres gracias a su actividad antioxidante. Restaura el film hidrolipídico evitando la deshidratación cutánea.



OBSERVACIONES



- Aplicar de 2 a 3 veces al día en las zonas de riesgo hasta su completa absorción y cicatrización.



- Se usa sólo sobre piel íntegra.
- No friccionar.
- No mezclar con otros productos de uso tópico.



ALGINATOS



APÓSITO DE ALGINATO.

ALGISITE M
15x20 CM
GC: E69119
RF: 66000521
PRECIO: 3,19 €

INDICACIONES

- Tratamiento de heridas de moderada a altamente exudativas. Gran capacidad de absorción.
- Compuesto de fibras de alginato cálcico.
- Se adapta suavemente al lecho de la herida y al absorber el exudado se transforma en gel, favoreciendo desbridamiento autolítico.
- Puede usarse con terapia de compresión.
- Tiene acción hemostática.



OBSERVACIONES



→ Especialmente recomendado en úlceras venosas. También indicado en lesiones por presión, heridas quirúrgicas, neoplásicas y sinus pilonidal. De elección las primeras 24h tras sangrado en desbridamiento cortante.



→ No usar en tejido necrótico seco (escara) o en heridas poco exudativas.



ALGINATOS




APOSITO DE ALGINATO.

CUTIMED ALGINATE
10 x 10 CM
GC: E64880
RF: 72634-09
PRECIO: 0,75 €

INDICACIONES

- Tratamiento de heridas de moderada a altamente exudativas. Gran capacidad de absorción.
- Compuesto de fibras de alginato cálcico.
- Se adapta suavemente al lecho de la herida y al absorber el exudado se transforma en gel, favoreciendo desbridamiento autolítico.
- Puede usarse con terapia de compresión.
- Tiene acción hemostática.

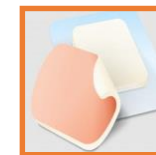

OBSERVACIONES

- Especialmente recomendado en úlceras venosas. También indicado en lesiones por presión, heridas quirúrgicas, neoplásicas y sinus pilonidal.
- De elección las primeras 24h tras sangrado en desbridamiento cortante.



- No utilizar en heridas poco exudativas, ni en placas necróticas.



ANTIMICROBIANOS



APOSITO MALLADO C/ PLATA.

ACTICOAT FLEX 10 X 20 CM

GC: E67262

RF: 66800409

PRECIO: 12,32 €

INDICACIONES

- En presencia de exudado y un apósito secundario de cura en ambiente húmedo, ayuda a mantener un entorno húmedo en la herida que favorece una rápida cicatrización.
- Proporciona una liberación sostenida de plata en el lecho de la herida durante un mínimo de 3 días.
- Puede ser retirado sin causar trauma en el lecho de la herida.
- Capa de poliéster flexible recubierta con plata nanocristalina.



OBSERVACIONES

- En heridas poco exudativas mojar con agua potable.
- Se puede usar en terapia de presión negativa.



- No mojar el apósito con solución salina.
- No usar en pacientes que se vayan a realizar una resonancia magnética ni radioterapia.
- Pacientes con sensibilidad conocida a la plata.



ANTIMICROBIANOS



APÓSITO CARBÓN Y PLATA.

ACTISORB PLUS 25 10,5X10,5 CM

GC: E67607

RF: MAP105

PRECIO: 2,74 €

INDICACIONES

→ Indicado para tratar la contaminación bacteriana, la infección o el olor de una amplia gama de heridas: traumáticas, quirúrgicas, úlceras por presión, úlceras en miembros inferiores, úlceras del pie diabético y carcinomas fungiformes.




OBSERVACIONES



→ Puede ser colocado indistintamente por cualquiera de sus caras. Puede ser plegado fácilmente para ser introducido en heridas cavitadas o tunelizadas.

→ Se recomienda que aplique sobre él un apósito de espuma de poliuretano. Puede ser necesario cambiar el apósito entre 24 y 72 horas. Puede permanecer hasta 7 días. No libera plata en el lecho de la herida.

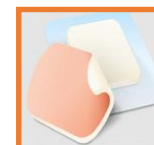


→ El apósito debe ser retirado en aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a exámenes diagnósticos de imágenes por Resonancia Magnética .

→ Nunca debe ser recortado ni humedecido.



ANTIMICROBIANOS

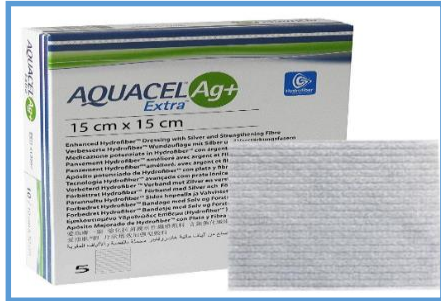

APÓSITO HIDROFIBRAS CON PLATA.

AQUACEL AG+ EXTRA 15x15 CM.

GC: E64663

RF: 413568

PRECIO: 5,40 €



APÓSITO HIDROFIBRAS CON PLATA- CINTA.

AQUACEL AG+ 2x45 CM.

GC: E64846

RF: 413571

PRECIO: 1,71 €

INDICACIONES

→ Plata Iónica al 1.2%. Uso como barrera a la penetración bacteriana, heridas donde hay una infección o un elevado riesgo, pie diabético, úlceras vasculares, quirúrgicas, traumáticas; heridas con propensión al sangrado, oncológicas con exudado.

→ Heridas donde se tiene sospecha de presencia bacteriana a causa de la cronicidad / no progresión.



OBSERVACIONES




→ El apósito debe colocarse de manera que sobrepase al menos 1cm el borde de la herida. En heridas cavitadas, dejar un margen mínimo de 2,5cm de la misma por fuera de la herida para poder retirar la cinta fácilmente. Rellenar la herida cavitada sólo un 80% de su capacidad, para facilitar la expansión.



→ No debería utilizarse en individuos sensibles o que hayan presentado reacciones alérgicas a la plata, a la sal di-sódica del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) y cloruro de bencetonio.



ANTIMICROBIANOS

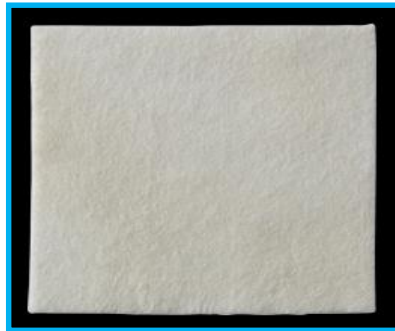

**APÓSITO DE
ALGINATO C/PLATA.**

**BIATAIN ALGINATO AG
10X10 CM
GC: E65201
RF: 3760
PRECIO: 1,29 €**

INDICACIONES

- Aplicar en lesiones exudativas con tejido desvitalizado, esfacelado
- lesiones cavitadas/tunelizadas , heridas con exudado de moderado a abundante.
- Tiene capacidad bacteriostática, bactericida y hemostática.
- Al contacto con exudado, este se transforma en gel, favoreciendo desbridamiento autolítico.



OBSERVACIONES




- Cambio del apósito por saturación o hasta 7 días.
- Alta integridad del apósito.



- No debe utilizarse sobre heridas secas o con exudado leve.
- Pacientes con sensibilidad conocida a la plata.



ANTIMICROBIANOS

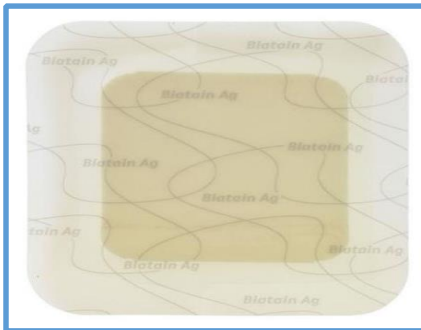

APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/PLATA-BORDES.

BIATAIN PLATA ADHESIVO
12,5x12,5 CM
GC: E65197
RF: 9632
PRECIO: 1,51 €

INDICACIONES

- Heridas colonizadas o infectadas con exudado: úlceras por presión, quemaduras de 2º grado, zonas donantes.
- Efecto antimicrobiano continuo durante todo el tiempo de uso.
- Apósito de espuma de plata suave y adaptable cuya acción ha demostrado facilitar una cicatrización más rápida de las heridas infectadas.



OBSERVACIONES



- En presencia de exudado, se libera plata de manera continua en el lecho de la herida hasta 7 días.
- Puede utilizarse para una amplia variedad de heridas con exudado, con cicatrización retardada a causa de bacterias.



- Pacientes con sensibilidad conocida a la plata.



ANTIMICROBIANOS



**APÓSITO GASA
HIDROFÓBICO
DE CAPTACIÓN
BACTERIANA.**

**CUTIMED SORBACT
7x9 CM
GC: E82044
RF: 72165-00
PRECIO: 3,84 €**

INDICACIONES

- Malla de acetato impregnado con cloruro de dialquilcarbamilo.
- Capta físicamente los patógenos presentes en la herida y los inactiva.
- Indicado en heridas contaminadas, colonizadas o infectadas (heridas crónicas, heridas traumáticas), heridas quirúrgicas (dehiscencias, fístulas, abscesos) e infecciones cutáneas micóticas.



OBSERVACIONES



→ Dependiendo del nivel de exudado se puede combinar con hidrogeles amorfos.



→ No combinar con pomadas, cremas, ni sustancias oleosas, ya que inhiben las propiedades captadoras del apósito.



ANTIMICROBIANOS



APÓSITO ABSORBENTE CON IODO.

IODOSORB DRESSING

6X4 CM

GC: D66569

RF: 66001290

PRECIO: 7,38 €

INDICACIONES

- Absorbe exudado de manera controlada.
- Ambiente húmedo en la lesión que favorece el proceso de cicatrización.
- Limpia la lesión de tejido esfacelado y/o necrótico, realizando un desbridamiento. Eficaz frente al biofilm.
- Gelifica en contacto con la herida.



OBSERVACIONES



- Puede permanecer en la herida hasta 72h. El apósito se cambia cuando se ha saturado por el exudado y haya liberado el yodo. El cambio de color indica el momento en que el producto debe retirarse.
- Se aplica moldeándolo según necesidad de la herida. Puede ocasionar un ligero dolor (escozor, picor) pasajero.



- Uso combinado con cremas y ungüentos. NO usar con antisépticos de mercurio o taurolidina. NO sobre tejido necrótico seco.
- No usar en niños, lactantes, mujeres embarazadas, pacientes con trastornos de la glándula tiroidea o disfunción renal ni pacientes con sensibilidad conocida al yodo.



ANTIMICROBIANOS



**APOSITO DE ESPUMA
DE POLIURETANO
C/SILICONA Y PLATA.**

MEPILEX PLATA
15x15 CM
GC: E71864
RF: 287310
PRECIO: 7,86 €

INDICACIONES

- Utilizarlo para úlceras del pie diabético o de la pierna, úlceras por presión y quemaduras de espesor parcial.
- Actividad antimicrobiana rápida y sostenida durante 7 días.
- Apósito de espuma de baja adherencia, que inactiva los patógenos relacionados con la herida (bacterias y virus) en los primeros 30 minutos.



OBSERVACIONES



- Capa de contacto con silicona. Contiene carbón.
- Debe cubrir la piel perilesional seca al menos entre 1 y 2 cm en caso de tamaños pequeños y 5 cm en caso de tamaños grandes.
- Atraumático durante los cambios de apósito.
- Retirar antes de realizar pruebas de Resonancia Magnética.



- Pacientes con sensibilidad conocida a la plata.



ANTIMICROBIANOS



SOLUCION IRRIGACIÓN DE HERIDAS.

PRONTOSÁN

350 ML

GC: B41691

RF: 400403

PRECIO: 9,87 €

INDICACIONES

- Solución para limpieza, descontaminación e hidratación de heridas.
- Tratamiento de biofilm.
- Adecuado para terapia de presión negativa con irrigación.



OBSERVACIONES



- Aplicar en fomento y dejar actuar en la herida 10 minutos.



- No debe usarse en el SNC o en las meninges, en el oído medio, ojos o como irrigación intestinal.
- No limpiar la lesión tras su uso, salvo tratamiento con colagenasa.
- No debe usarse con tensioactivos aniónicos, pomadas, aceites o enzimas.
- Una vez abierto, desechar transcurridas 8 semanas.



ANTIMICROBIANOS



GEL IRRIGACIÓN DE HERIDAS.

PRONTOSÁN 30 ML

GC: B40558

RF: 400505

PRECIO: 9,90 €

INDICACIONES

- Gel para la descontaminación e hidratación de heridas.
- Tratamiento de biofilm.



OBSERVACIONES

- Puede permanecer sobre el lecho de la herida tras la cura.
- Cubrir la herida con una capa de 3 a 5 mm de espesor.



- No debe usarse en el SNC o en las meninges, en el oído medio, ojos o como irrigación intestinal.
- No debe usarse con tensioactivos aniónicos, pomadas, aceites o enzimas.



ANTIMICROBIANOS



ÁCIDO HIALURÓNICO + SULFADIZINA ARGÉNTICA/CREMA.

RYM QUEMADURAS 25 GR.

GC: E78009

RF: 168629

PRECIO: 7,70 €

INDICACIONES

- Ácido hialurónico (sal sódica) junto a sulfadiazina argéntica (antibiótico tópico) con propiedades hidrofílicas, que promueve el proceso de cicatrización y protege el nuevo tejido formado. Acción antimicrobiana de amplio espectro.
- Indicado para tratamiento de heridas agudas y crónicas con riesgo de infección, úlceras vasculares, quemaduras de primer y segundo grado.



OBSERVACIONES



- Aplicar una fina capa de crema sobre la superficie de la herida una o dos veces al día en función de la gravedad de la herida.



- No usar concomitante con desinfectantes que tengan sales de amonio cuaternario ya que puede precipitar el ácido hialurónico.
- Evitar exposición de las zonas tratadas a la luz solar porque mancha la piel. No administrar en embarazadas y bebés.



ANTIMICROBIANOS



APOSITO DE FIBRAS DE POLIACRILATO CON PLATA .

URGO CLEAN AG
15 X 15 CM
GC: E99808
RF: 178567.1
PRECIO: 6,26 €

INDICACIONES

→ Tratamiento de heridas agudas y crónicas exudativas que precisen desbridamiento, con riesgo o signos de infección local.



OBSERVACIONES



→ Apósito microadherente de fibras poliabsorbentes y matriz TLC-Ag . Combinación de limpieza y acción antimicrobiana que reduce la carga bacteriana de la lesión. Debe estar en contacto directo con el lecho de la herida.



→ Sensibilización conocida a la plata.

→ No es adecuado para su uso como esponja quirúrgica en heridas con sangrado abundante.

→ No utilizar combinado con peróxido de hidrógeno, antisépticos organomercuriales o hexamidina.

→ No utilizar en pacientes que se van a someter a pruebas de imágenes con resonancia magnética .



APÓSITO IMPREGNADO



APOSITO MALLADO C/ PARAFINA

URGOTUL FLEX
15x15 CM
GC: E65894
RF: 157028.4
PRECIO: 3,46 €

INDICACIONES

- Lesiones superficiales, traumáticas y erosivas, quemaduras y zonas donantes.
- Apósito primario para contacto directo con la herida, que necesita apósito de cierre.
- Disminuye el dolor en la retirada del producto de la lesión.



OBSERVACIONES



- Pielles perilesionales friables, frágiles y lesiones dolorosas.
- En caso de utilizar un antiséptico de manera previa, aclarar cuidadosamente la herida antes de aplicar.



DESBRIDANTES ENZIMÁTICOS



ÁCIDO HIALURÓNICO CON COLAGENASA.

RYM COLAGENASA 30 GRS

GC: F34403

RF: 182869.9

PRECIO: 6,64 €

INDICACIONES

- Ácido hialurónico (sal sódica) al 0,2% junto colagenasa de *Vibrio Alginolyticus*. Promueve el proceso de cicatrización, modulando la respuesta inflamatoria y mejora el depósito de colágeno. Favorece un entorno húmedo y preparación del lecho de la herida .
- Indicado para tratamiento de lesiones crónicas como lesiones por presión, úlceras vasculares y úlceras diabéticas.



OBSERVACIONES

- Las escaras duras/secas se deben suavizar mediante la aplicación de un apósito húmedo. Aplicar capa de mínimo espesor.
- No usar concomitante con jabones/detergentes o desinfectantes que tengan sales de amonio cuaternario , plata u otros metales pesados, que pueden reducir la acción del producto. No usar en tejido cartilaginoso y tendones expuestos.



ESPUMAS DE POLIURETANO



**APÓSITO DE ESPUMA
DE POLIURETANO
BORDES ADHESIVOS.**

ALLEVYN ADHESIVE 17,5 X 17,5 CM

GC: E67828

RF:66000045

PRECIO: 2,91 €

ALLEVYN ADHESIVE 22,5 X 22,5 CM

GC: E67932

RF:66000046

PRECIO: 4,40 €

INDICACIONES

- Cicatrización de heridas por segunda intención crónicas o agudas como úlceras por presión, de miembros inferiores y pie diabético; heridas quirúrgicas y como apósito secundario.
- Prevención como apósito primario.



OBSERVACIONES



- El apósito puede permanecer colocado hasta un total de siete días o hasta que el exudado retenido en el interior del apósito sea visible y se aproxime a 2 cm del borde del apósito.



- Cuando se utiliza el producto en lesiones infectadas, inspeccionar la lesión al menos, cada 72 horas.



ESPUMAS POLIURETANO




**APÓSITO DE ESPUMA
DE POLIURETANO
C/ SILICONA BORDES
ADHESIVOS.**

**ALLEVYN GENTLE BORDER
15x15 CM
GC: E64313
RF: 66800975
PRECIO :2,03 €**

INDICACIONES

- Apósito hidrocélular con adhesivo y base de silicona.
- Capacidad de absorción.
- No se adhiere al lecho de la lesión.
- Minimiza el trauma durante los cambios de apósito.
- Puede retirarse y recolocarse sin perder las propiedades adherentes.
- Fácilmente adaptable a cualquier zona del cuerpo.

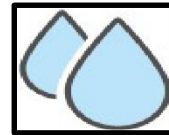

OBSERVACIONES




- La espuma debe sobrepasar como mínimo 1-2 cm. los bordes de la lesión.
- Limpiar, secar, quitar exceso de vello y humedad de la piel alrededor de la lesión.



- No utilizar con peróxido de hidrógeno.



ESPUMAS POLIURETANO

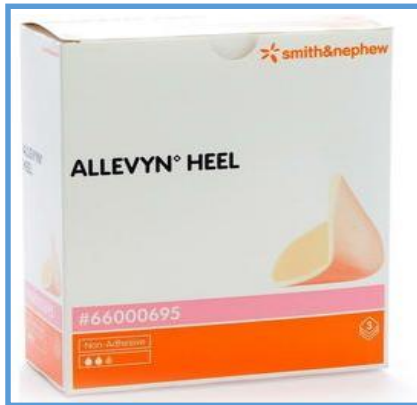

**APÓSITO DE ESPUMA
DE POLIURETANO
CODO -TALON.**

ALLEVYN HEEL
GC: E67980
RF:66000695
PRECIO: 3,61 €

INDICACIONES

- Contribuye a la reducción de la presión y absorbe exudado de manera controlada.
- Conformado para talón y codo.
- Pueden permanecer colocados hasta 7 días dependiendo del tipo de lesión y nivel de exudado.



OBSERVACIONES




- Precisa fijación secundaria que permita la visualización diaria de los talones como, por ejemplo, venda tubular de malla.



- Cuando se utiliza el producto en lesiones infectadas, inspeccionar la lesión al menos, cada 72 horas.



ESPUMAS POLIURETANO

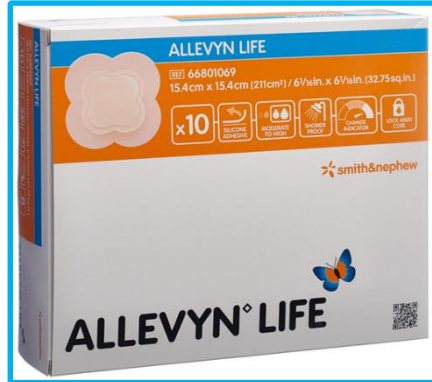

APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/INDICADOR DE CAMBIO Y SILICONA.

ALLEVYN LIFE 15,4 x 15,4 CM
GC E82870
RF 66801069
PRECIO 3,83 €

ALLEVYN LIFE 21x21CM
GC E82867
RF 66801070
PRECIO: 6,59 €

INDICACIONES

- Apósito multilobular con indicador de cambio.
- Elevada capacidad de absorción y retención, incluso bajo presión.
- No se adhiere al lecho de la lesión, minimizando el trauma durante los cambios de apósito.
- Puede retirarse y colocarse sin perder sus propiedades adherentes.
- Minimiza el riesgo de maceración.



OBSERVACIONES




- La espuma debe sobrepasar como mínimo 1- 2 cm, los bordes de la lesión.
- Cambiar cuando el exudado cubra el 75% del apósito.



- No utilizar con peróxido de hidrógeno.



ESPUMAS POLIURETANO

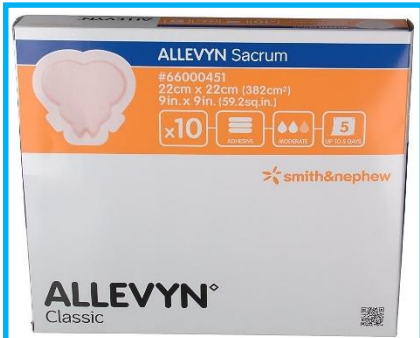


**APOSITO DE ESPUMA
POLIURETANO / SACRO,
BORDES ADHESIVOS.**

ALLEVYN SACRUM 17X17CM
GC E64943
RF 66000700
PRECIO 2,25 €

ALLEVYN SACRUM 22,5 x 22,1 CM
GC E67775
RF 66000451
PRECIO 3,85 €

INDICACIONES

- Espuma diseñada para la prevención y tratamiento de lesiones por presión en zona sacra.
- Lesiones con niveles de exudado moderado y alto con cura en ambiente húmedo, que favorece el desbridamiento.

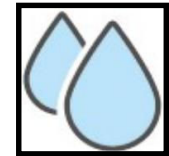

OBSERVACIONES



- La espuma debe sobrepasar como mínimo 1-2 cm. los bordes de la lesión.



- No utilizar con peróxido de hidrógeno.



ESPUMAS POLIURETANO



**APOSITO DE
HIDROFIBRA
C/ ESPUMA
POLIURETANO.**

**AQUACEL FOAM ADHESIVO
12,5X12,5 CM
GC: E64546
RF: 420619
PRECIO: 2,09 €**

INDICACIONES

- Absorción vertical reduciendo el riesgo de maceración de la herida.
- En su estado gelificado aporta una retirada no traumática.
- Protege la lesión frente a agentes contaminantes.



OBSERVACIONES



- Reborde adhesivo de silicona que permite ser reposicionado.



ESPUMAS POLIURETANO



APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO Y POLIACRILATO CON SILICONA.

BIATAIN SILICONE 12,5x12,5 CM
GC: E85758
RF: 33436
PRECIO: 2,64 €

BIATAIN SILICONE 17,5x17,5 CM
GC: E85767
RF :33438
PRECIO: 5,37 €

INDICACIONES

- Alta capacidad de absorción y retención.
- Se puede recolocar sin perder adherencia.
- Alivia la presión.
- Absorción vertical.
- Se adapta al lecho de la herida.
- Reborde adhesivo de silicona con adherencia suave.
- Apósito semi-permeable, estimulan la cicatrización de la herida.
- Utilizar en heridas de hasta dos centímetros de profundidad.



OBSERVACIONES

→ La espuma debe sobrepasar como mínimo 1-2 cm. los bordes de la lesión.



→ No utilizar con soluciones de peróxido de hidrógeno.



ESPUMAS POLIURETANO




**APÓSITO DE
ESPUMA
DE POLIURETANO
Y POLIACRILATO
CON SILICONA
CODO / TALON.**

BIATAIN SILICONE TALÓN
18x18 CM
GC: F22946
RF: 33406
PRECIO: 6,46 €

INDICACIONES

- Alta capacidad de absorción y retención.
- Se puede recolocar sin perder adherencia.
- Alivia la presión.
- Absorción vertical.
- Se adapta al lecho de la herida.
- Reborde adhesivo de silicona con adherencia suave.
- Apósito semi-permeable, estimulan la cicatrización de la herida.
- Utilizar en heridas de hasta dos centímetros de profundidad.

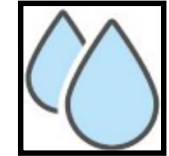

OBSERVACIONES



→ La espuma debe sobrepasar como mínimo 1-2 cm. los bordes de la lesión.



→ No utilizar con soluciones de peróxido de hidrógeno.



ESPUMAS POLIURETANO



APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO.

BIATAIN
SOFT-HOLD 15 X 15 CM
GC:E64945
REF: 3475
PRECIO:1,22 €

INDICACIONES

- Amplio rango de heridas exudativas como úlceras vasculares, por presión, pie diabético, quemaduras de segundo grado, heridas postquirúrgicas o abrasiones.
- Presenta una capa adherente de parafina y puede permanecer en la lesión hasta siete días dependiendo del tipo de lesión y nivel de exudado.



OBSERVACIONES



- Para retirar el apósito levantar con cuidado las esquinas y separarlas de la lesión.
- Puede precisar fijación secundaria.



- Cuando se utiliza el producto en lesiones infectadas, inspeccionar la lesión al menos, cada 72 horas.



ESPUMAS POLIURETANO



APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA.

CUTIMED SILTEC PLUS
10X10 CM
GC: E64507
RF: 73288-01
PRECIO: 1,31 €

INDICACIONES

- Apósito de espuma de poliuretano con capa de contacto en silicona que proporciona una suave adherencia para facilitar su fijación.
- Elevada capacidad de absorción, incluido exudado viscoso, y retención, incluso bajo presión.
- Elevada capacidad de reducción de la presión.



OBSERVACIONES



- La espuma debe sobrepasar como mínimo 1-2 cm. los bordes de la lesión.
- Puede precisar fijación secundaria.



- No utilizar con soluciones de peróxido de hidrógeno.



ESPUMAS POLIURETANO




**APÓSITO DE ESPUMA
DE POLIURETANO
C/ SILICONA.**

MEPILEX BORDER 7.5x7.5 CM
GC: E82237
RF: 295200
PRECIO: 1,32 €

MEPILEX BORDER 10x10 CM
GC: E64314
RF: 295300
PRECIO: 2,02 €

INDICACIONES

- Apósito multicapa, auto-adherente.
- Atraumático para la herida y para la piel circundante durante la retirada.
- No se adhiere al lecho de la lesión.

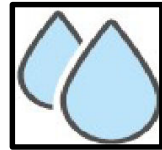

OBSERVACIONES




- La espuma debe sobrepasar como mínimo 1-2 cm. los bordes de la lesión.



- No utilizar con soluciones de peróxido de hidrógeno.



ESPUMAS POLIURETANO

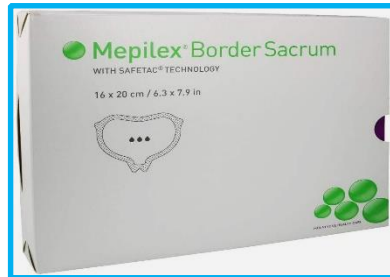

**APÓSITO DE ESPUMA
DE POLIURETANO
C/ SILICONA / SACRO.**

**MEPILEX BORDER
SACRUM 16x20 CM**

GC: F35917
RF:282010

PRECIO:7,15 €

**MEPILEX BORDER
SACRUM 22x25 CM**

GC: F61537
RF: 282410

PRECIO: 9,46 €

INDICACIONES

- Espuma diseñada para la prevención y tratamiento de lesiones por presión en zona sacra.
- Lesiones con niveles de exudado moderado y alto con cura en ambiente húmedo, que favorece el desbridamiento.



OBSERVACIONES



- Utilizar en pacientes con pieles frágiles



- No utilizar con soluciones de peróxido de hidrógeno.



ESPUMAS POLIURETANO



APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO C/ SILICONA.

MEPILEX LITE 10x10 CM
GC: E64610
RF: 284100
PRECIO :2,64 €

INDICACIONES

- Espuma de poliuretano extrafina.
- Adhesivo de silicona con adherencia suave.
- Se adapta perfectamente a cualquier superficie corporal.
- Atraumático para la herida y para la piel circundante durante la retirada.
- Protección de pieles frágiles y delicadas.
- Puede precisar fijación secundaria.



OBSERVACIONES

- La espuma debe sobrepasar como mínimo 1-2 cm. los bordes de la lesión.
- Puede precisar fijación secundaria.



- No utilizar con soluciones de peróxido de hidrógeno.



HIDROCOLOIDES



APÓSITO DE HIDROCOLOIDE.

VARIHESIVE EXTRAFINO
15x15 CM
GC: E65251
RF: 187957
PRECIO: 1,06 €

INDICACIONES

- Apósito compuesto de carboximetilcelulosa sódica, pectina y gelatina.
- Especialmente indicado para lesiones ligeramente exudativas y prevención de lesiones por fricción.
- Usar en heridas con nivel de exudado mínimo.



OBSERVACIONES

- Puede aparecer una burbuja en la superficie del apósito por la formación de gel, lo que indicaría su retirada. Aplicar el apósito que sobrepase 3 cm el borde de la lesión.
- Puede precisar fijación secundaria.



- Posibilidad de fugas de exudado que pueden afectar al tejido perilesional.
- No usar en heridas con riesgo o signos de infección.



HIDROFIBRAS



APÓSITO HIDROFIBRAS HIDROCOLOIDE.

AQUACEL EXTRA 15 X 15 CM
GC: E64650
RF: 420673
PRECIO: 4,01 €



APÓSITO HIDROFIBRAS HIDROCOLOIDE- CINTA.

AQUACEL CINTA 2X45 CM
GC: E64543
RF :403770
PRECIO: 1,27 €

INDICACIONES

- Heridas exudativas.
- Absorción en sentido vertical a la lesión, controlando o limitando la expansión lateral de los fluidos.



OBSERVACIONES





- El apósito debe colocarse de manera que sobrepase al menos 1cm el borde de la herida.
- En heridas cavitadas, dejar un margen mínimo de 2,5cm de la misma por fuera de la herida para poder retirar la cinta fácilmente. Rellenar la herida cavitada solo un 80% de su capacidad para facilitar la expansión.



- No usar en tejido necrótico seco (escara).



HIDROFIBRAS

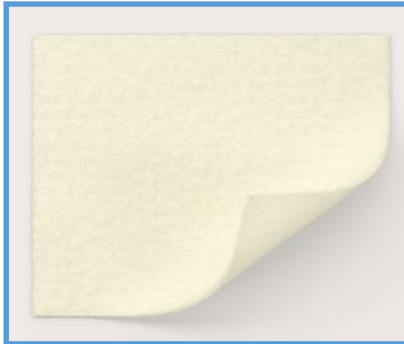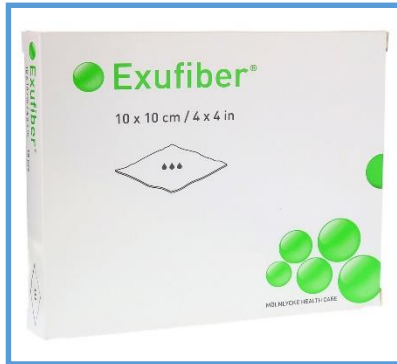

**APÓSITO DE
POLIVINILO ALCOHOL
(PVA).**

EXUFIBER 10X10 CM.
GC: E92260
RF: 709901
PRECIO: 3,41 €

INDICACIONES

- Gran capacidad de absorción y retención de fluidos. Uso en heridas cavitadas.
- Compuesto de fibras de polivinilo de alcohol (PVA).
- Se adapta suavemente al lecho de la herida y permite su retirada atraumática y en una sola pieza creando un suave gel.
- Bloquea el exudado previniendo las fugas y maceración.



OBSERVACIONES

→ Especialmente recomendado en úlceras venosas. También indicado en lesiones por presión, úlceras de pie diabético, heridas quirúrgicas, neoplásicas y sinus pilonidal.



→ No usar en tejido necrótico seco (escara).



HIDROGELES



APÓSITO HIDROGEL AMORFO.

INTRASITE GEL 15 GR

GC: E64932

RF: 7311

PRECIO: 0,77 €



APÓSITO HIDROGEL DE TEJIDO.

INTRASITE CONFORMABLE

10X20 CM

GC: E67655

RF: 66000325

PRECIO: 1,98 €

INDICACIONES

- Desbridamiento autolítico de tejido necrótico/esfacelos en lesiones con nulo o bajo exudado.
- Estimulan la cicatrización de la herida.
- Facilita el llenado de heridas profundas, permitiéndoles cicatrizar desde su base y proporcionando una barrera física que previene el cierre en falso de la herida.



OBSERVACIONES



- Junto a colagenasa si la herida precisa aporte de humedad. (desbridamiento sinérgico).



- Asociar a hidrofibras/alginatos.



PELÍCULA DE POLIURETANO



ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO. FILM TRANSPARENTE.

FIXOMULL TRANSPARENT 5 CM

GC: D85480
RF: 72216-00
PRECIO: 7,37 €

FIXOMULL TRANSPARENT 10 CM

GC: E34292
RF: 72216-01
PRECIO: 11,44 €

INDICACIONES

- Fijación de apósitos en áreas grandes.
- Fijación de sondas, catéteres o instrumentos de medida.



OBSERVACIONES



- El producto debe ser aplicado sobre la piel seca y limpia.
- Impermeable al agua.
- Aplicar una presión firme sobre el apósito y sus bordes garantiza la correcta adhesión del film.
- Radiotransparente: no contiene componentes absorbentes de radiación, por lo que no es necesario retirarlo para exámenes de radioterapia o por rayos X.



POLIACRILATOS



APÓSITO FIBRA POLIACRILATO.

URGOCLEAN 10 X 10 CM

GC: E64737

RF :161444.5

PRECIO: 3,04 €



APÓSITO FIBRA POLIACRILATO CINTA.

URGOCLEAN MECHA 5 x 40 CM


GC E64738

RF 161920.4

PRECIO: 6,54 €

INDICACIONES

- Desbridamiento de todo tipo de heridas exudativas con fibrina.
- Heridas exudativas cavitadas o sinusales, heridas crónicas.

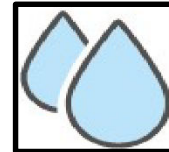

OBSERVACIONES

- Precisa un apósito secundario o venda de fijación.
- La renovación del apósito se hará cada 1 a 2 días, en función del exudado, y podrá ser más espaciada en función de herida y evolución.



- No asociar al peróxido de hidrógeno, ni a antisépticos de la familia de los organomercuriales ni a la hexamidina, ni sustancias oleosas, pomadas, ungüentos...
- No utilizar UrgoClean Mecha en la zona endo-nasal en cirugía rino-sinusal.



PRODUCTOS BARRERA



LIQUIDO BARRERA PROTECTOR DE PIEL.

ASKINA BARRIER FILM 28 ml
GC: D66658
RF: 4002801
PRECIO: 5,28 €

INDICACIONES

- Protege los bordes de la herida y la piel perilesional frente al exudado, la incontinencia y la fricción.
- Barrera cutánea frente a la humedad para la protección de la piel dañada o intacta. No reduce la adhesión de los productos adhesivos. No contiene alcohol. No irritante.



OBSERVACIONES

- Puede dar una protección de hasta 96 horas frente a la humedad. Se aconsejan 72 horas o dependiendo de factores como necesidad de limpieza de la zona o cambios de Apósitos.
- Se debe dejar secar durante 1 minuto especialmente en pliegues cutáneos.



- Evitar su uso en quemaduras de tercer grado. No mezclar con otros productos de uso tópico.
- No usar en presencia de infección.



PRODUCTOS BARRERA



CREMA PROTECTORA DE PIEL.

CUTIMED PROTECT CREMA 90 gr

GC: E77384

RF:72652-03

PRECIO: 5,83 €

INDICACIONES

- Protege los bordes de la herida y la piel perilesional de agentes irritantes. Preserva tanto la piel intacta como la irritada.
- Previene la maceración.
- Terapia adyuvante eficaz de la piel en el tratamiento de las heridas crónicas.
- Buena permeabilidad al oxígeno y al vapor de agua.



OBSERVACIONES

- Puede dar una protección de hasta 96 horas frente a la humedad. Se aconsejan 72 horas o dependiendo de factores como necesidad de limpieza de la zona o cambios de apósitos.
- Se debe dejar secar durante 1 minuto especialmente en pliegues cutáneos.



- Evitar su uso en quemaduras de tercer grado. No mezclar con otros productos de uso tópico.
- No usar en presencia de infección.



PRODUCTOS BIOACTIVOS



APÓSITO DE COLÁGENO.

CUTIMED EPIONA 10 x 10 CM

GC: E68007

RF: 73229-01

PRECIO:12,01 €

INDICACIONES

- Indicado en heridas estancadas en fase de granulación-epitelización.
- Lámina de colágeno nativo obtenido de la dermis bovina. Está compuesto en el 90 % por colágeno y un 10% de alginato.
- Aportan colágeno externo a la lesión.
- Atrae y se une a las metaloproteasas, con lo que protegen a los factores de crecimiento endógenos.



OBSERVACIONES



→ Usar en heridas limpias, sin tejido desvitalizado ni signos de infección.



→ No usar como primer escalón terapéutico , ni en heridas infectadas o con tejido desvitalizado.



PRODUCTOS BIOACTIVOS




ÁCIDO HIALURÓNICO CREMA .

RYM CICATRIZANTE 25 GRS.
GC:A52327
RF: 168628
PRECIO: 7,70 €

INDICACIONES

- Ácido hialurónico (sal sódica) al 0,2%. Facilita la migración celular y promueve el proceso de cicatrización.
- Indicado para tratamiento de las irritaciones y lesiones cutáneas como injertos, heridas quirúrgicas, úlceras vasculares, quemaduras de primer y segundo grado así como lesiones por presión proporcionando hidratación a la piel frente a abrasiones, fricción y deshidratación.

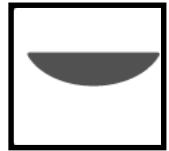

OBSERVACIONES

→ Aplicar una fina capa de crema sobre la superficie de la herida dos o más veces al día.



- No usar concomitante con desinfectantes que tengan sales de amonio cuaternario ya que puede precipitar el ácido hialurónico.
- No usar como primer escalón terapéutico , ni en heridas infectadas o con tejido desvitalizado.



PRODUCTOS BIOACTIVOS



APÓSITO MALLADO CON OLIGOSACÁRIDOS.

URGOSTART CONTACT 10x10 CM
GC: E69682
RF: 166680.2
PRECIO: 13,18 €

INDICACIONES

- Apósito de contacto ultraflexible que acelera la cicatrización de las heridas y se puede utilizar en fase de epitelización.
- Heridas crónicas sin exudado o con exudado leve.



OBSERVACIONES



- Se recomienda humedecer los guantes con suero fisiológico y utilizar las alas de protección para facilitar la aplicación.
- Cambiar cada 2 a 4 días (hasta un máximo de 7 días) según el nivel de exudado y el estado clínico de la herida.



- No usar como primer escalón terapéutico, ni en heridas infectadas o con tejido desvitalizado.



SILICONAS



INDICACIONES

→ Adecuado para pieles de pacientes extremadamente sensibles tales como neonatos, paciente pediátrico, paciente geriátrico con piel envejecida, piel apergaminada o en pacientes tratados con corticoides e inmunodeprimidos.



ESPARADRAPO HIPOALERGICO DE SILICONA.

HYPAFIX SKIN SENSITIVE.

GC: B41817

RF:79966-01

PRECIO: 6,54 €



OBSERVACIONES

- Lámina de tejido no tejido recubierto de silicona autoadherente.
- Superficie transpirable (permeable al vapor de agua), reduce el riesgo de maceración de la piel.
- Repelente al agua .
- Material radiotransparente, no es necesario retirarlo para exámenes de rayos X.



SILICONAS



APOSITO MALLADO C/ SILICONA.

MEPITEL 18x10 CM

GC: E64940

RF: 291010

PRECIO 3,18 €

INDICACIONES

- Lesiones superficiales, traumáticas y erosivas, quemaduras y zonas donantes.
- Apósito hidrófobo, que se adhiere a piel seca y no al lecho de la lesión.
- Retirada atraumática.
- Disminuye el dolor en la retirada del producto de la lesión.
- Se usan para evitar o minimizar cicatrices hipertróficas.



OBSERVACIONES



→ Piel perilesional frágil, friable, lesiones dolorosas.



→ Pueden provocar tatuaje de la lesión.




DOCUMENTOS DE CONSULTA-BIBLIOGRAFÍA



- Documento técnico GNEAUPP Nº III Manejo local de las úlceras y heridas 2ª edición-Noviembre de 2018.
<https://gneaupp.info/wp-content/uploads/2018/11/GNEAUPP.DT03.Tratamiento.pdf>
- Documento técnico GNEAUPP Nº XIV Qué no hacer en las heridas crónicas Recomendaciones basadas en la evidencia 1ª edición-Noviembre de 2018.
<https://gneaupp.info/wp-content/uploads/2018/11/GNEAUPP.DT14.NOHACER.pdf>
- Guías de buenas prácticas de la RNAO Valoración y manejo de las lesiones por presión para equipos interprofesionales Tercera edición-Mayo 2016.
- Guía de práctica clínica para la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión. Edita: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. I.S.B.N.: 978-84-690-9460-0
- Blasco-García MC, Cuñarro-Alonso JM, Rueda-López J, Segovia-Gómez T, Delgado-Fernández R. Materiales y productos para la cicatrización de las heridas crónicas. En: García-Fernández FP, Soldevilla-Agreda JJ, Torra Bou JE (eds). Atención Integral de las Heridas Crónicas- 2ª edición. Logroño: GNEAUPP-FSJJ. 2016. Vol. (2)
- García-Fernández FP, Blasco-García MC, Rueda-López J, Segovia-Gómez T. Cura avanzada de heridas: terapia de presión negativa, factores de crecimiento plaquetario, sustitutos epidérmicos y apósitos bioactivos. En: García-Fernández FP, Soldevilla-Agreda JJ, Torra Bou JE (eds). Atención Integral de las Heridas Crónicas- 2ª edición. Logroño: GNEAUPP-FSJJ. 2016. Vol. (2)
- García-González RF, Gago-Fornells M. Cuidados de la piel peri lesiona I. En: García-Fernández FP, Soldevilla-Agreda JJ, Torra Bou JE (eds). Atención Integral de las Heridas Crónicas- 2ª edición. Logroño: GNEAUPP-FSJJ. 2016. Vol. (2)
- Soldevilla-Agreda JJ, Blasco-García MC, García-González RF, Gago-Fornells M, López-Casanova P, Segovia-Gómez T, Bermejo-Martínez M. Preparación del lecho de la herida: limpieza y desbridamiento. En: García-Fernández FP, Soldevilla-Agreda JJ, Torra Bou JE (eds). Atención Integral de las Heridas Crónicas- 2ª edición. Logroño: GNEAUPP-FSJJ. 2016. Vol. (2)



OTROS RECURSOS

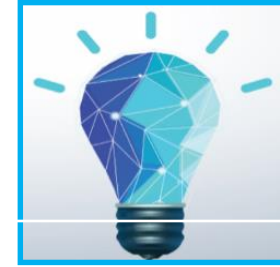

→ GuíaUPP (app móvil. Android/IOS).

→ Image meter (app móvil).

→ Registro de Curas y Heridas (app móvil).

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsanidad.registrocuras>

→ HELCOS. Sistema integrado para el manejo de heridas.

<https://helcos.net/users/login>

→ WR.Wound-Registry® (app móvil).

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.healthapp.woundregistry>





Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Godei
Editorial

ISBN 978-84-17970-97-0



9 788417 970970

D.L.: Gr-1118/20